


TSU VÆVSPRØVE VEJLEDNING

KLARGØRING AF VÆVSPRØVEN



1. Placering af vævsprøve applikatoren

Tag TSU nålen og placer i prøverøret og åbn herefter den sorte fastholdelses ring på tungen.

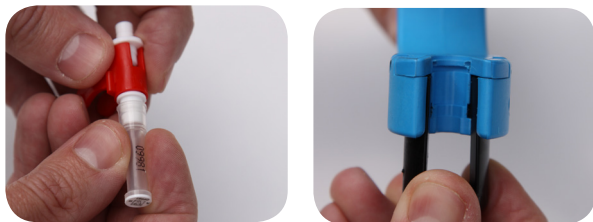


2. Indsæt TSU prøvenålen

Indsæt TSU prøvenålen, som vist på nedenstående billede. Herefter lukkes fastholdelses ringen og låser nålen.



3. Fastgør nålen

Tryk forsigtig håndtagene på tungen sammen indtil det store stempel stopper mod det røde stykke. Nålen er nu helt fastgjort. Når nålen er indsat i stemplet, kan du frigøre håndtaget.

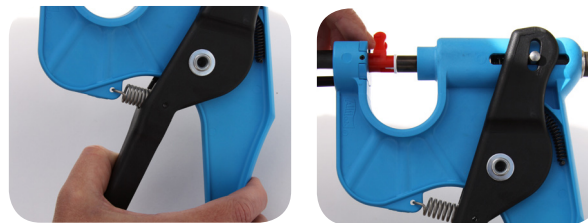

4. Indsæt

Fjern nu forsigtigt den røde indsats ved at klikken den af som vist på billedet. PAS PÅ FINGRENE NÅLEN ER SPIDS. Nålen er nu klargjort til brug.



TSU VÆVSPRØVE VEJLEDNING

VÆVSPRØVE UDTAGNING



1. VIGTIG

TSU rør er KUN til engangsbrug!

Både rør og nål kan ikke genbruges.

Her ses forskellen på et brugt og ubrugt TSU rør.



Ubrugt



Brugt (rød)

2. Tag vævsprøven

Skub den klargjorte TSU tang hen over øret og anbring tangen ca. 1-2 cm. fra kanten af øret - Undgå udtag i store vener.

Dette gøres bedst i en meget hurtig og flydende bevægelse.



3. Fjern TSU nålen fra tangen

Fjern TSU prøven fra tangen ved at åbne fastholdelses ringen på tangen og tag tuben ud.

En korrekt TSU prøve skal være klar og synlig i tuben som på billedet.



4. Fjern nålen fra tangen

Fjern den brugte nål fra tangen ved at trække håndtaget fra hinanden. Dette vil løsne nålen og gøre nålen let aftageligt.

