

PROTRAQ MINI


Plateau de 100 transpondeurs mini



Animaux d'espèces non domestiques

ProTraQ Mini est une nouvelle génération de transpondeurs d'identification de taille mini conditionnés dans une aiguille fine (15 gauge) et lubrifiée, garantissant des distances de lecture optimales. ProTraQ Mini se présente sous la forme d'un plateau contenant 100 aiguilles affûtées.


Grâce à un applicateur multi-usage adapté et robuste, **l'identification efficace d'un grand nombre d'animaux** simultanément est désormais possible.

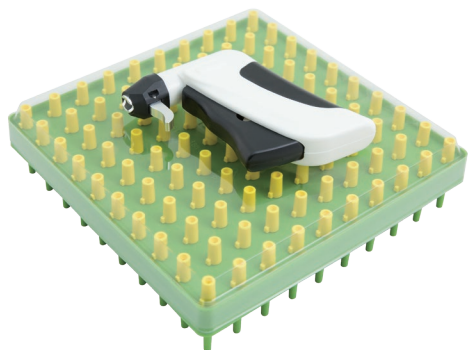


Présentation de ProTraQ Mini

Le plateau ProTraQ Mini est conditionné dans une poche assurant la stérilité du produit pendant 5 ans. Le plateau est accompagné d'une planche de 100 étiquettes portant un numéro d'identification unique et inaltérable à 15 chiffres programmé dans le transpondeur.

L'applicateur multi-usage adapté est commercialisé avec le plateau, ou vendu séparément. Une fois le plateau retiré de la poche de stérilisation et le couvercle transparent en plastique soulevé, l'identification des animaux peut débuter. Les 100 aiguilles sont disposées sur le plateau dans la même direction. Positionner le plateau de telle sorte à orienter les **ergots des aiguilles jaunes** vers le bas :

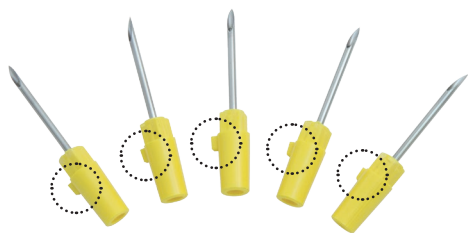

Les aiguilles ProTraQ mini sont dotées d'un **ergot** permettant leur bonne orientation sur le plateau

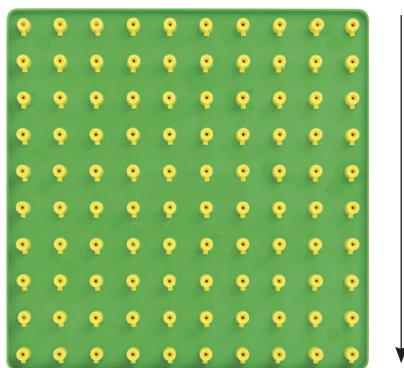

Les **ergots** des aiguilles ProTraQ Mini sont orientées vers le bas

L'aiguille située en haut à gauche du plateau est le premier transpondeur d'identification contenant le numéro d'identification imprimé sur la première étiquette. Les numéros d'identification imprimés sur la planche d'étiquettes suivent l'ordre de placement des aiguilles, comme représenté dans le schéma ci-après :

250229500017406


63863_T001 P010

> Le numéro d'identification correspond à l'aiguille située en position « 10 »

250229500017407


63863_T001 P100

> Le numéro d'identification correspond à l'aiguille située en position « 100 »

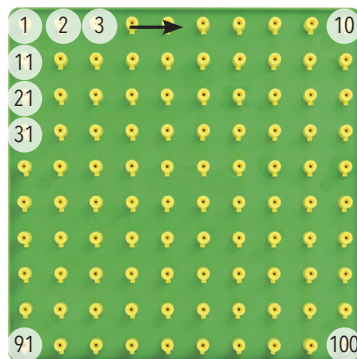

Comment utiliser ProTraq Mini ?

Approcher l'applicateur sur une aiguille, en le maintenant dans l'axe de l'ergot. Appuyer pour que l'aiguille se bloque dans l'applicateur, puis le relever tout en maintenant le plateau. Une fois l'animal identifié, actionner le levier d'éjection pour libérer l'aiguille de l'applicateur. Placer l'aiguille vide dans un container adapté puis renouveler la procédure pour les animaux suivants.

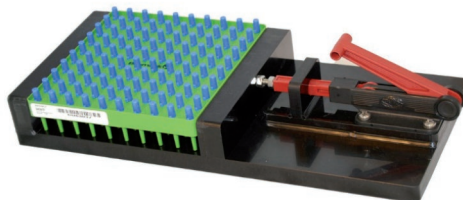

Pour plus de confort, un support plateau peut être commandé séparément

Précautions d'utilisation

Conservez le plateau ProTraq Mini dans le carton d'emballage jusqu'à son utilisation. La poche d'emballage maintient la stérilité du dispositif jusqu'à son ouverture. Il est fortement recommandé d'utiliser le plateau ProTraq Mini pour l'identification consécutive de 100 animaux. Le maintien de la stérilité ne peut être garanti en dehors de cette condition. Usage interdit pour les animaux de production.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU TRANSPONDEUR PROTRAO MINI	
Dimensions (Ø*L)	1.4*10.3 mm
Poids	35 +/- 6mg
Température de fonctionnement	-25°C à +85°C
Température de stockage	+15°C à +25°C
Passif, sans batterie	-
Taille de l'aiguille	15 Gauge
Fréquence	134,20 kHz
Encapsulation	Bioverre (BioGlass 8625)

Fabriqué et distribué par :

Allflex Europe

Route des Eaux

BP90219 - 35500 Vitré

www.allflex-europe.com