

Instrukcja obsługi aplikatora do kolczyków z igłą do pobierania fragmentu tkanki z ucha (TST)



Livestock Intelligence™

WAŻNE!

Przed zastosowaniem należy upewnić się, że zwierzę jest odpowiednio unieruchomione.




Opakowanie zawiera 4 elementy (kolczyki męski i żeński, igła oraz próbówka).



Przyciśnij sprężynowy, metalowy zacisk na dolnym ramieniu aplikatora i umieść żeńską część kolczyka w aplikatorze.



Przyciśnij sprężynowy, metalowy zacisk znajdujący się na boku górnego ramienia aplikatora i umieść igłę oraz męską część kolczyka w otworze. Upewnij się, że kolczyk jest stabilny.

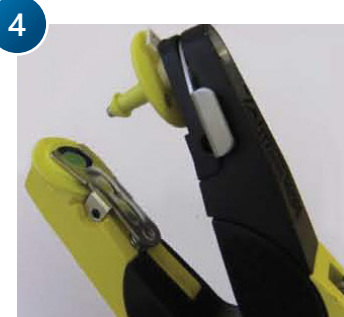

Gotowy do aplikacji kolczyk umieść pomiędzy dwoma chrząstkami usznymi, tak aby żeńska część była prostopadłe do ucha. Szybkim i pewnym ruchem zacisnij kolczykownicę. Kolczyk zostanie zapięty na uchu, a tkanka pobrana do igły.




Igła pozostaje w górnej części aplikatora. Próbka tkanki powinna być widoczna na końcu igły. Umieść próbówkę (sprawdź, czy numer odpowiada numerowi kolczyka) w dolnej części aplikatora, zacisnij aplikator tak aby igła znalazła się w próbówce.



Aby wyjąć zamkniętą próbówkę wystarczy nacisnąć metalowy zacisk na boku górnego ramienia aplikatora.



Szczelnie zamknięta próbówka z igłą jest gotowa do wysłania na badanie laboratoryjne.
Zrób to jak najszybciej!

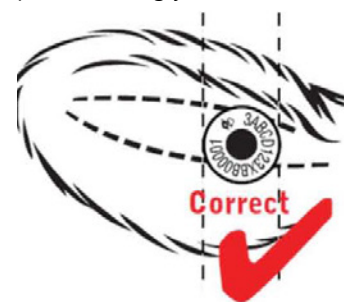



Livestock Intelligence™