


Instrukcja obsługi aplikatora do pobierania próbek tkanki z ucha zwierzęcia (TSU)




Livestock Intelligence™

A. Przygotowanie aplikatora do pobrania tkanki

WAŻNE! Przed popraniem próbek, próbnik TSU należy przechowywać w temperaturze pokojowej (maksymalnie przez 12 miesięcy). Unikać skrajnych warunków - bardzo wysokiej i bardzo niskiej temperatury.

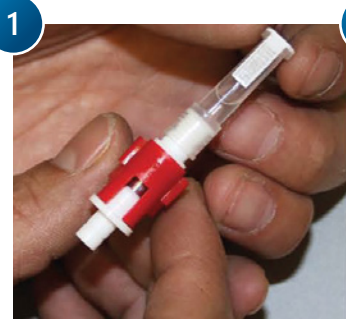

1 Wyciągnij próbkę TSU z opakowania. Próbnik powinien być złożony w jedną całość. Jeżeli jednak jego elementy są oddzielnie należy je ponownie złożyć.

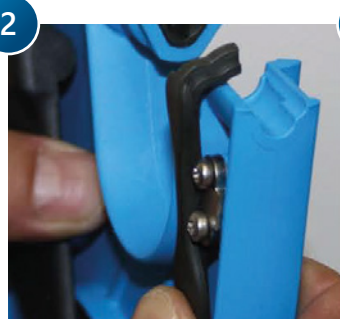

2 Upewnij się, że uchwyt znajdujący się u podstawy aplikatora jest pusty, a następnie naciśnij zacisk aby go otworzyć.



3 Umieść próbkę w aplikatorze jak pokazano na rysunku. Zwolnij zacisk, aby zablokować próbkę.



4 Ostrożnie ściśnij rączki aplikatora i w razie potrzeby dopasuj położenie próbki. Po prawidłowym osadzeniu końcówka aplikatora będzie ściśle przylegać do czerwonego plastikowego klipsa.



5 Puść rączki.



6 Usuń czerwony plastikowy klips pociągając go na zewnątrz



Aplikator jest teraz załadowany i gotowy do pobrania próbki. Wszystkie części są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

UWAGA! OSTRE ELEMENTY, RYZYKO SKALECZENIA!

Psary Małe, ul. Nekielska 11G, 62-300 Września, T: +048 61 895 20 10 / F: +048 61 895 20 12 / biuro@allflexpolska.pl / www.allflexpolska.pl

Instrukcja obsługi aplikatora do pobierania próbek tkanki z ucha zwierzęcia (TSU)



Livestock Intelligence™

B. Pobieranie próbki tkanki z ucha

WAŻNE!

Próbki tkanki należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy próbki są analizowane w ciągu jednego roku od pobrania.

1




Upewnij się, że w aplikatorze znajduje się nieużywany próbnik.

2



Uwaga! W próbnikach już zużytych widoczny jest czerwony tłok.

3

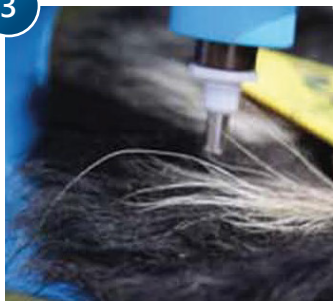

Nasuń aplikator na ucho tak, aby przebijak znajdował się w odległości 2,5 cm od ucha. Uważaj przy tym, aby omijać widoczne żyły i chrząstki.

4



Pobierz próbkę ze wskazanego powyżej obszaru (2,5 cm od głowy, 5 cm od krawędzi ucha).

5



Ściśnij ręczki aplikatora, aby pobrać próbkę, następnie zwolnij zacisk. Spróbuj to zrobić jednym płynnym ruchem. Poruszaj się ze zwierzęciem i nie walcz z jego ruchami.

6



Usuń próbkę z aplikatora.

7



Sprawdź, czy pobieranie zakończyło się powodzeniem. Jeśli nie, wyrzuć próbkę i powtórz czynności z nowym próbnikiem.

8



Rozsuń ręczki aplikatora i wyjmij zużyty przebijak. Wyrzuć go bezpiecznie.

UWAGA! PRZEBIJAK JEST BARDZO OSTRY!